

Contact perfect™ MATRIX BANDS


Deutsche Gebrauchsanweisungen



1. Das Band mithilfe eines Tofflemire-Halters platzieren. Anschließend verkeilen.



2. Verbindungsstreifen mit der Schere oder einem Diamantfräser abschneiden.

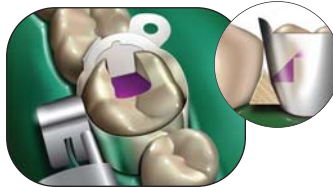


3. Eine schräg vom Bandfenster ausgehende Komposit-"Rampe" bilden. (Klebfreies Harz verwenden.) Anschließend lichthärten.



4. Das Komposit in großen Schichtdicken applizieren. (Nicht lichthärten!)




5. Das Fenster mit einer Zahnsonde entfernen. (Nicht lichthärten!)

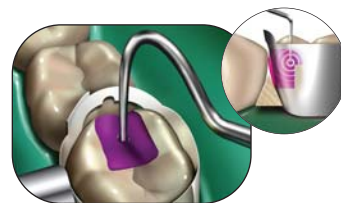

6. Den präparierten Zahn einmal mit einer Zahnsonde "anstoßen", um das Komposit zu verschieben und auszudehnen. Anschließend lichthärten.



7. Das mit der Zahnsonde gebildete Loch mit Komposit oder fließfähigem Komposit füllen. Anschließend lichthärten.

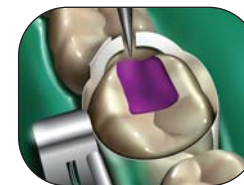

8. Das Band an der Einkerbung mit einem Diamantfräser lösen. Anschließend den Halter zwecks Entfernung spannen.

Miltex
Redefining Excellence

phone 717 840-9335
toll free 866 854-8300
www.miltex.com